



**Регистрация**  
**Установка в артикулятор**



**Руководство по эксплуатации**



## **РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **ПРИЕМНАЯ КАРЕТКА ARTEX®**

#### **ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Непосредственная альтернатива передвижному столику или прямому переносу лицевой дуги. Суставной механизм с прикусной вилкой прикрепляется к каретке, удерживающей регистрат относительно оси при закреплении в нижней части артикулятора Artex®.

#### **ЭКСПЛУАТАЦИЯ /ОБРАЩЕНИЕ**

Снимите штифт и держатель переднего ведения. Вставьте резцовый столик в верхнюю часть. Вставьте приемную каретку в нижнюю часть до упора и закрепите. Верхняя часть резцового столика лежит на приемной каретке. Вставьте опору прикусной вилки в нижнюю часть (с помощью магнита или винтовой резьбы). Вставьте трехмерный суставной механизм в гнездо на приемной каретке и зафиксируйте в нужном положении с помощью болта **(Рис. 1-3)**

Установите артикулятор в перевернутое положение. Переместите поперечную планку опоры прикусной вилки, чтобы она касалась прикусной вилки, и затяните винт с накатанной головкой. Планку можно дожать с помощью винтовой резьбы и/или телескопического фитинга. **(Рис. 4)**

Установите артикулятор в рабочее положение. Вставьте верхнечелюстную модель в отпечатки прикусной вилки. Вставьте базисную пластинку в верхнюю часть. Проверьте расстояние между моделью и верхней частью и отрегулируйте его при необходимости, например, путем шлифовки модели или нанесения гипса в два этапа. **(Рис. 5+6)**

Размешайте необходимое для данного расстояния количество гипса до кремообразной консистенции. Увлажните основание модели. Нанесите гипс на базисную пластинку и увлажните поверхность модели. Закройте верхнюю часть. Ослабьте давление на гипс, простучав верхнюю часть. **(Рис. 7+8)**

#### **Отдельные детали:**

Заказ №:

218631

Приемная каретка Artex



Made in the European Union



Производитель  
Дистрибьютор

**Amann Girrbach AG**  
Герршафтсвизен 1  
6842 Коблах, Австрия  
Тел. +43 5523 62333-0  
Факс +43 5523 55990

Дистрибьютор

**Amann Girrbach GmbH**  
Дюрренвег 40  
75177 Пфорцхайм, Германия  
Тел. +49 7231 957-100  
Факс +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



**AMANNGIRRBACH**